

# NOTICE POUR LES CAISSES DE TRANSPORT

## Expédition prête en 5 étapes

### 1 Caisse de transport

Utiliser la caisse de transport pour le stockage et le transport des dispositifs médicaux utilisés sur le patient.

Équipements/Contenu : Bulletin de remise, sac en plastique transparent pour emballer les dispositifs plus scellés pour fermer la caisse de transport.

### 2 Préparation des produits médicaux

Nettoyer les dispositifs médicaux en suivant les instructions de préparation en milieu hospitalier.

### 3 Emballage et étiquetage

Emballer séparément chaque dispositif médical nettoyé au préalable avec les informations du fabricant d'origine/l'étiquette du fabricant d'origine\* dans le sac plastique prévu à cet effet.

Vérifier que la caisse de transport est complète :

- Emballage des dispositifs médicaux
- Bulletin de remise
- Informations du fabricant d'origine/Étiquette du fabricant d'origine\*

#### \*ATTENTION

Les informations du fabricant d'origine/l'étiquette du fabricant d'origine ne valent que pour tous les dispositifs médicaux envoyés initialement. Sans l'étiquette de fabricant d'origine, un reconditionnement ne sera pas possible.

### 4 Bulletin de remise

Veuillez vous assurer qu'un bulletin de remise signé a été joint à la caisse de transport.

### 5 Fermeture de la caisse de transport

Fermer le couvercle de la caisse de transport et introduire sur les côtés avant gauche et droit de la caisse fermée un scellé fourni dans l'orifice prévu à cet effet. La caisse de transport peut être enlevée.

### 6 Expédition

Placer la boîte d'expédition verte dans le sac en plastique blanc et sceller ce dernier. La boîte d'expédition VANGUARD est maintenant prête à être collectée