

INSTRUCTIES VOOR TRANSPORTBOX

Greed voor verzending in slechts 5 stappen

1 Transportbox

Gebruik de transportdoos voor opslag en transport van de medische hulpmiddelen welke voor herverwerking worden aangeboden.

Bijlagen/inhoud: Overdrachtsformulier, doorzichtige kunststofzakjes om de producten te verpakken plus zegels om de transportdoos te verzegelen.

2 Voorbereiding van de medische hulpmiddelen

Reinig de medische hulpmiddelen volgens de instructies voor de voorbereiding in het ziekenhuis.

3 Verpakken en labels/etiketten aanbrengen

Verpak elk vooraf gereinigd medisch hulpmiddel afzonderlijk met de respectievelijk originele fabrieksinformatie en/of het originele fabrieksetiket* in het bijgeleverde doorzichtige kunststofzakje. Controleer de transportbox op volledigheid:

- Verpakking van het medische hulpmiddel incl.
- Originele fabrieksinformatie en/of het originele fabrieksetiket*
- Overdrachtsformulier

*OPGELET

Originele fabrieksinformatie en/of het originele fabrieksetiket is alleen van toepassing op alle medische hulpmiddelen die voor de eerste keer herverwerking worden ingestuurd. Zonder het originele fabrieksetiket is geen herverwerking mogelijk.

4 Overdrachtsformulier

Zorg ervoor dat het ondertekende overdrachtsformulier is bijgesloten in de transportbox.

5 Transportbox sluiten

Sluit de transportbox-deksel en druk de bijgevoegde zegels in de daarvoor bestemde opening aan de rechter- en linker-voorzijde van de gesloten box. De transportbox is nu klaar om opgehaald te worden.

6 Verzending

Plaats de groene verzegelde verzenddoos in de witte plastic zak en sluit deze af met de plakstrip. De VANGUARD verzenddoos is nu klaar voor ophaling.